

2023 年苏州市艾梅乙补充室间质评活动安排

一、检测项目与时间表：

2023 年爱梅乙补充室间质评共 5 个批号,要求检测**乙肝标志物**(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb 5 项)、**丙肝抗体** (抗-HCV)、抗-HIV、抗-TP (特), (因本次临时定制的质控品原料供应问题, 非特异性 TP 抗体评价项暂停) 共 8 个项目。活动时间安排如下:

室间质评活动	质控物批号	测定时间	上报时间
第 1 次	2023431、432、433、434、 435	6 月 16 日~6 月 23 日	6 月 19-27 日

二、质控物保存、处理和回报：

- 1、收到质控物后请仔细检查其包装和内容物的完整性以及标本的数量和编号, 质控物-15℃以下保存, 即测可存 4℃冰箱, 避免反复冻融, 质控品使用时待完全融化且平衡至室温, 颠倒 5 次以上混匀后使用, 开盖前短暂离心。如有絮状或沉淀属正常现象, 可先将质控品混匀后, 3000rpm 离心 5min 取上清检测。
- 2、对于常规的项目, 按一般待检样本对待; 对于要求稀释的项目, 按稀释后的样本对待, 无需再进行稀释。
- 3、室间质评样品已经灭活处理, 但仍应按有潜在生物传染性样本对待, 并根据相关规定使用及处理。

三、回报要求：

- 1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com/> , 用户登陆账号为 “SZ 原单位编号” , 见清单上实验室编号。
- 2、用 ELISA 或发光法等半定量方法需填报检测值; 金标法需在上报页面上传检测板条照片。
- 3、实验室未开展或外送项目选 “未开展”

四、评价方法：PT