

## 2024年第2次苏州市血细胞分析室间质评活动安排

### 一、检测项目与时间安排：

2024年第2次血细胞分析室间质评共5个批号，要求检测8个质评项目（WBC、RBC、Hgb、PLT、MCV、HCT、MCH、MCHC），活动安排如下：

室间质评活动	质控物批号	测定时间	回报截止日期
2024年第2次	241006~241010 <b>市质控物与省中心同步， 省参评单位不另发质控物按省批号回报</b>	10月14日-10月24日	10月26日

### 二、质控物保存与处理方法：

1、质控物的保存：收到质控物后**请保持直立放置并及时将其保存于2~8℃，切忌冷冻。**

2、质控物的处理方法：

(1) 测定时从冰箱中取出质控物，在室温下放置15分钟，放置过程中勿摇动。

(2) 混匀：①将质控物瓶口朝上置操作者双手掌心，双手来回搓动10次，动作要连贯。②颠倒小瓶，使瓶口朝下，将质控物置于操作者掌心，来回搓动10次。③重复①和②的步骤8次（共计2分钟左右）。④轻轻颠倒混匀1分钟左右。⑤瓶底朝上，确认瓶底无沉积物则说明已充分混匀。

(3) 按本室常规方法对质控物进行测定，质控样本视为具有潜在传染性。

### 三、回报要求：

1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com/>，用户登陆账号为“SZ+原单位编号”，见清单内实验室编号；报表内仪器方法试剂等栏可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项，也可更改。

2、不参加省室间质评的单位需在平台上报室内质控数据，如有填报问题可联系加室内质控填报群咨询。

### 四、评价方法：根据检测仪器进行分组统计。

