

2025 年第 1 次苏州市凝血试验室间质评活动安排

一、检测项目与时间安排：

2025 年第 1 次凝血试验室间质评共 5 个批号，质评检测项目为 PT、APTT、FIB，同时要求回报 PT-INR 值，共计 4 项。活动时间安排如下：

室间质评活动	质控物批号	测定时间	回报截止日期
第 1 次	251101~251105 市质控物与省中心同步， 省参评单位不另发质控物按省批号回报	4 月 18 日-4 月 25 日	4 月 30 日

二、质控物保存与处理方法：

- 1、质控物的保存：收到质控物后请及时将其保存于 2~8℃。
- 2、质控物的处理方法：使用时将质控物从冰箱中取出,加入 1.0ml 纯化水,轻轻旋转或倒置混合,切勿振摇,在室温放置 15-20 分钟待完全溶解后将质控物按你室常规方法进行测定。
- 3、本次同时发下的第 2 次质控物请按要求妥善保管，按第 2 次室间质评通知安排检测上报。

三、回报要求：

- 1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com/> ,用户登陆账号为“SZ+原单位编号”,见清单内实验室编号；报表内仪器、方法、试剂等栏因首次使用需逐项勾选，以后质评上报则可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项；**上报数据的原始截屏或照片请在回报表右上方“附件上传”内上传。**
- 2、不参加省室间质评的单位需在平台上报室内质控数据。

四、评价方法：采用 PT 方案进行统计。

