

2025年第1次苏州市临床常规化学室间质评活动安排

一、检测项目与时间安排：

2025年第1次临床化学室间质评共5个批号（参加省级室间质评的单位生化质控品不另发，但需上网填写回报）。开展质评项目22个（K、Na、Cl、Ca、Glu、Urea、TP、Alb、Cr、TCh、TG、TBil、ALT、AST、P、UA、ALP、GGT、LDH、HDL、CK、AMY），活动时间安排如下：

质评活动	质控物批号	测定时间	回报截止日期
第1次	202511~202515 市质控物与省中心同步， 省参评单位不另发质控物按省批号回报	4月18日-4月25日	4月30日

二、质控物保存与处理方法：

- 1、质控物的保存：收到质控物后，请按活动安排中的要求检查质控物是否破损或缺少。未复溶的质控血清应保存在2~8℃冰箱中。应将质控样本以患者标本对待，并视为具潜在传染性。
- 2、质控物的处理方法：使用时将质控物从冰箱中取出，按说明书用3.0ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后进行测定。
- 3、本次未同时下发第2次质控物（清单显示两次一起发），第2次质控物下半年10月发放。

三、回报要求：

- 1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com/>，用户登陆账号为“SZ+原单位编号”，见清单内实验室编号；报表内仪器方法试剂等栏可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项，也可更改；上报数据的原始截屏或照片请在回报表右上方“附件上传”内上传。
- 2、不参加省室间质评的单位需在 <http://www.yyeqa.com/> 平台上报室内质控数据，如有填报问题可联系加室内质控填报群咨询。

四、评价方法：根据检测方法进行分组统计。

