

补发第 1 次苏州市血细胞分析室间质评质控物及活动安排

一、项目与时间安排：

本次补发 2025 年第 1 次血细胞分析室间质评质控物对象为不参加省质评的实验室，本周四 5 月 22 日顺丰寄出。共 5 个批号，要求检测 8 个质评项目（WBC、RBC、Hgb、PLT、MCV、HCT、MCH、MCHC），活动安排如下：

室间质评活动	质控物批号	测定时间	上报截止日期
2025 年第 1 次	251001~251005 4 月份质评时延期发放的质控物	5 月 26 日-5 月 30 日	6 月 3 日

二、质控物保存与处理方法：

- 1、质控物的保存：收到质控物后**请保持直立放置并及时将其保存于 2~8℃，切忌冷冻。**
- 2、质控物的处理方法：
 - (1) 测定时从冰箱中取出质控物，在室温下放置 15 分钟，放置过程中勿摇动。
 - (2) 混匀：①将质控物瓶口朝上置操作者双手掌心，双手来回搓动 10 次，动作要连贯。②颠倒小瓶，使瓶口朝下，将质控物置于操作者掌心，来回搓动 10 次。③重复①和②的步骤 8 次（共计 2 分钟左右）。④轻轻颠倒混匀 1 分钟左右。⑤瓶底朝上，确认瓶底无沉积物则说明已充分混匀。
 - (3) 按本室常规方法对质控物进行测定，质控样本视为具有潜在传染性。

三、回报要求：

- 1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com:8086> ,用户登陆账号为“SZ+原单位编号”，见清单内实验室编号；报表内仪器方法试剂等栏可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项，也可更改；**请在回报表右上方“附件上传”内上传上报数据的原始截屏或照片，本次下发质控物水平与 4 月江苏省临检中心质控物不同步。**
- 2、不参加省室间质评的实验室需上报参评项目的室内质控数据。

四、评价方法：根据检测仪器进行分组统计。



苏州市临检中心 2025.5