

2025 年第 2 次苏州市血细胞分析室间质评活动安排

一、检测项目与时间安排：

2025 年第 2 次血细胞分析室间质评共 5 个批号，要求检测 8 个质评项目（WBC、RBC、Hgb、PLT、MCV、HCT、MCH、MCHC），活动安排如下：

室间质评活动	质控物批号	测定时间	回报截止日期
2025 年第 2 次	251006~251010 省参评单位请按省质控物批号回报	10 月 15 日-10 月 24 日	10 月 28 日

二、质控物保存与处理方法：

1、质控物的保存：收到质控物后**请保持直立放置并及时将其保存于 2~8℃**，切忌冷冻。

2、质控物的处理方法：

(1) 测定时从冰箱中取出质控物，在室温下放置 15 分钟，放置过程中勿摇动。

(2) 混匀：①将质控物瓶口朝上置操作者双手掌心，双手来回搓动 10 次，动作要连贯。②颠倒小瓶，使瓶口朝下，将质控物置于操作者掌心，来回搓动 10 次。③重复①和②的步骤 8 次（共计 2 分钟左右）。④轻轻颠倒混匀 1 分钟左右。⑤瓶底朝上，确认瓶底无沉积物则说明已充分混匀。

(3) 按实验室常规方法对质控物进行测定，质控样本视为具有潜在传染性。

三、回报要求：

1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com:8086/>，用户登陆账号为“SZ+原单位编号”；报表内仪器方法试剂等栏可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项，也可更改；上报数据的原始截屏或照片请在回报表右上方“附件上传”内上传。

2、不参加省室间质评的实验室需在 <http://www.yyeqa.com:8088/> 平台上报参评项目的室内质控数据。

四、评价方法：根据检测仪器进行分组统计。

